



TECHNISCHE HANDLEIDING



VAN BEIJCK & SITGO BV

Handcrafted in Holland

Deze handleiding dient ook als service documentatie bij uw SitGo, bewaar het goed!



Afleveringsdocument & Instructies SitGo

Model	
Framenummer	
Accu identificatienummer	

Datum aflevering	
-------------------------	--

Dealer:

Instructie bij aflevering

☐

Afstelling van het stuur en zadel op gebruiker

☐

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede

1. Inhoudsopgave Technische Handleiding

Inhoudsopgave.....	1
Belangenrijke aanwijzingen.....	2
Introductie.....	3
- Gebruik.....	3.1
- Onderdelen.....	3.2
- Specificaties.....	3.3
Veiligheid.....	4
Instructies voor gebruik.....	5
- Instellen.....	5.1
- Elektro.....	5.2
- Accu.....	5.3
- Laden.....	5.3.1
- Verlichting.....	5.4
- Verkeersveiligheid.....	5.5
- Onderhoud.....	5.6
- Weersomstandigheden vervoer.....	5.7
Rijden.....	6
Uitschakelen.....	6.1
Display.....	7
Foutcodes.....	7.1
CE Markering.....	8
Onderhoud.....	9
Verzekering.....	10
Aanvullende Informatie accu.....	11

2. Belangrijke Aanwijzingen

Lezen vóór Gebruik

Lees deze technische handleiding nauwkeurig door voordat u de SitGo in gebruik neemt. Dit is de beste manier om gevaarlijke situaties of problemen te voorkomen.

Voordelen van het Opvolgen van de Instructies

Wanneer u de instructies in deze technische handleiding naleeft, profiteert u van de volgende voordelen:

- U behoudt uw aanspraak op garantie.
- U voorkomt technische problemen met de SitGo.
- U heeft langer plezier van uw SitGo.

3. Introductie van de SitGo

De SitGo is een tweewielige, elektronisch aangedreven loophulpmiddel die ontworpen is voor comfort en mobiliteit.

Belangrijkste Kenmerken

- Toegankelijkheid: De SitGo valt in de categorie gehandicaptenvoertuig met motor.
- Weggebruik: U mag ermee op de openbare weg en het trottoir rijden (met een maximumsnelheid van 6 km/h).
- Veiligheid & Ondersteuning: Het voertuig is voorzien van een veiligheidsblokkering. De elektronische ondersteuning schakelt pas in nadat u uzelf heeft afgezet.
- Ontwerp: Met zijn lage instap en 24 inch velgen is de SitGo uitermate geschikt voor mensen met een mobiliteitsprobleem.

3.1 Gebruik en Veiligheidsvoorschriften

De SitGo is ontworpen voor **normaal gebruik op een vlakke en solide ondergrond**.

Verplichte Veiligheidsmaatregelen

- **Verkeersregels:** Neem altijd de geldende **verkeers- en veiligheidsregels** voor fietsen en scootmobielen in acht.
- **Instructies:** Alle **veiligheidsinstructies** zoals omschreven in deze gebruiksaanwijzing dienen **strikt te worden opgevolgd**.


Doelgroep en Beperkingen

- **Doelgroep:** De SitGo is bedoeld voor volwassenen met een mobiliteitsprobleem.
- **Minimumleeftijd:** De bestuurder moet minimaal 16 jaar oud zijn.
- **Geschiktheid Bestuurder:** De bestuurder dient zelfstandig mobiel te zijn en mag geen zware visuele of andere beperkingen hebben die het veilig besturen van de SitGo nadelig beïnvloeden.

Aansprakelijkheid en Verzekering

- **Verzekering:** De SitGo moet voorzien zijn van een WA (Wettelijke Aansprakelijkheid) verzekering. De SitGo dient tevens verzekerd te worden met de wettelijk verplichte gele verzekeringssticker.
- **Aansprakelijkheid:** De fabrikant en/of verkoper aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel dat voortvloeit uit elk ander gebruik dan beschreven.

3.2 Onderdelen van de SitGo

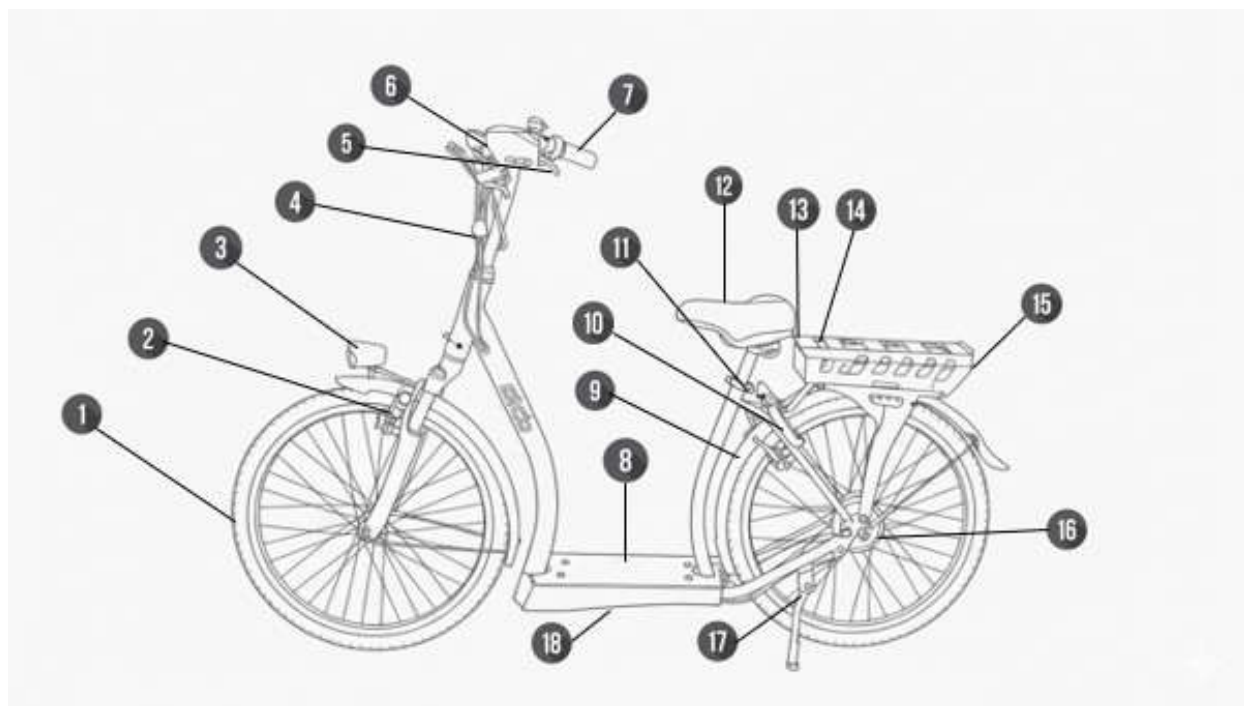

1	24" inch velg met band (24x1,75)
2	Shimano V-Brake remmen
3	Koplamp (deze wordt via het display bediend)
4	Kabel connectors (display, remhendels, gashendel)
5	Remhendel inclusief remonderbreker
6	Van Beijck display
7	Gashendel
8	Treeplank
9	Kabelafdekkap
10	Axa slot
11	Zadel verstel klem
12	Zadel
13	Laadpunt accu
14	Aan/uit knop accu
15	Achterlicht
16	Van Beijck 36V 250W motor
17	Zijstandaard
18	CE MDR markering + framenummer

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Nede

3.3 Technische Specificaties

Onderdeel	Specificatie
Frame materiaal	25CrMo4 / Chroom-molybdeen
Gewicht	15 kg
Lengte	169 cm
Hoogte	Bovenkant stuur: 107 cm
	Bagagedrager: 69 cm
Motor	Van Beijck 250W 36V (borstel loze vrijlopmotor)
Controller	RoHS Sine wave 36V
Verlichting	LED 36V (inclusief remlicht achter)
Slot	AXA Solid ART4001
Remsysteem	Shimano V-Brake
Voorvork	Kogee Impulsa (geveerd)
Spatborden	SKS-Germany
Banden	47-507 (24 x 1.75)

4. Veiligheid en Belangrijke Mededelingen

Lezen Vóór Gebruik

Zorg ervoor dat u deze technische handleiding volledig heeft doorgelezen vóór u de SitGo in gebruik neemt. Houd u strikt aan alle daarin vermelde veiligheidstips en waarschuwingen om problemen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Aanvullende Veiligheidsmaatregelen

- Aanbevolen: Voor uw eigen veiligheid adviseren wij het gebruik van een fietshelm.
- Meldingsplicht: Wij wijzen u erop dat elk ernstig voorval in verband met dit hulpmiddel gemeld moet worden aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van het land waar de gebruiker gevestigd is.

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede

5. Instructies voor Gebruik

Om een veilige en prettige rit met de SitGo te garanderen, is het essentieel dat u de onderstaande instructies nauwlettend in acht neemt en naleeft.

5.1 Instellen van de SitGo

Voordat u begint met rijden, is het cruciaal dat u het stuur en het zadel instelt op de juiste afmetingen voor de gebruiker. Besteed hier veel aandacht aan, want de hoogte van het stuur en zadel heeft grote invloed op de veiligheid, het comfort en het rijgedrag.

Belangrijke Aandachtspunten

- **Maximale Uittrekhoogte (WAARSCHUWING):**
 - Trek de stuur- en zadelstang nooit verder uit dan de markering.
 - Reden: Als de buis niet diep genoeg in de schacht steekt, ontstaat er een risico op afbreken, wat kan leiden tot ernstige verwondingen.
- **Remmen:**
 - De remmen zijn standaard correct afgesteld.
 - Ze mogen alleen door erkende dealers worden gecontroleerd en bijgesteld tijdens het reguliere onderhoud.

5.2 ⚡ Bediening van het Elektrische Systeem

De SitGo is uitgerust met het 36V Van Beijck elektrische systeem.

Functies van de Elektromotor

De elektromotor biedt twee hoofdfuncties:

- Volledig elektrisch rijden: Ondersteuning bij het voortbewegen.
- Vrijloop: De wielen draaien vrij wanneer er geen elektrische aandrijving actief is.

Systeem In- en Uitschakelen

Actie	Instructie	Opmerking
Aanzetten	Druk één keer kort op de aan/uit-knop op het display.	Het display licht op.
Uitschakelen	Houd de aan/uit-knop ingedrukt.	
Automatisch uit	Het systeem schakelt automatisch uit na 5 minuten inactiviteit.	Voor energiebesparing.

⚠ Veiligheidsinstructie

Schakel het elektrische systeem altijd uit voordat u afstapt en schakel het pas weer in nadat u weer op het zadel zit. Dit is cruciaal voor uw eigen veiligheid.

5.3 Accu: Onderhoud en Veiligheid

Deze sectie bevat cruciale instructies voor het bewaren en opladen van uw accu om de levensduur en veiligheid te waarborgen.

Opladen en Opslag

- **Nooit leeg wegzetten (WAARSCHUWING):** Zet de SitGo nooit weg met een lege of bijna lege accu. Dit kan de spanning onder een kritische grens brengen, waardoor de accu mogelijk niet meer opgeladen kan worden.
- **Oplader:** Gebruik uitsluitend de bijgeleverde 36V Van Beijck lader. Dit voorkomt schade en ongelukken.
- **Temperatuur bij Opladen:** Laad de accu niet op in de volle zon, in vochtige ruimtes, of bij temperaturen lager dan min 5 graden Celsius. De oplader mag niet nat worden.
- **Opslagtemperatuur:** Sla de accu nooit op in vochtige ruimtes, of bij temperaturen hoger dan 40 graden Celsius of lager dan min 5 graden Celsius.
- **Onderhoud:** De behuizing van de accu en de oplader mogen nooit geopend worden.

Levensduur en Capaciteit

- **Capaciteitsverlies:** Houd er rekening mee dat de capaciteit van een accu in de loop der tijd zal afnemen. Dit is een normale producteigenschap.
- **Levensduur bevorderen (Advies):** Om de bruikbare capaciteit zo lang mogelijk te behouden, is het aan te raden de accu af en toe volledig leeg te rijden en direct daarna weer op te laden.
- **Beperkte Levensduur:** De levensduur is beperkt en wordt beïnvloed door gebruiksomstandigheden. Goede verzorging bevordert de levensduur aanzienlijk.

Accubediening en Vergrendeling

- **Verwijderen:** U kunt de accu uit de slede halen door het slot linksom te draaien.
- **Vergrendelen voor Rijden:** Schuif de accu volledig aan totdat u een klik hoort. Vergrendel de accu altijd met de sleutel vóór het rijden.
- **Activering / Slaapmodus:** Door éénmaal op de accustatus-toets te drukken, wordt de batterij voor 3 maanden ingeschakeld. Als de accu in die periode niet wordt gebruikt, gaat deze automatisch in de slaapmodus.

Bij Problemen

Neem bij problemen of vragen over de accu direct contact op met uw dealer!

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede

5.3.1 Instructies voor Opladen en Veiligheid

Oplaadprocedure

Volg deze stappen voor veilig opladen:

1. Aansluiten: Sluit eerst de lader aan op de accu en steek daarna de stekker in het stopcontact.
2. Loskoppelen: Haal eerst de stekker uit het stopcontact en ontkoppel daarna de lader van de accu.
3. Laadstatus
 - Rood lampje: De accu wordt geladen.
 - Groen lampje: De accu is vol. Verwijder de lader nu.

Belangrijkste Regels

- Gebruik alleen de bijgeleverde 36V Van Beijck lader.
- Laad op bij kamertemperatuur; vermijd temperaturen lager dan min 5 graden Celsius of hoger dan 40 graden Celsius.
- Gebruik de lader alleen in droge, niet-vochtige binnenruimtes. De lader mag niet nat worden.
- De behuizing van de accu en de oplader mag niet worden geopend.
- Bij problemen: Neem direct contact op met uw dealer.

5.4 Verlichting

De SitGo is uitgerust met LED-verlichting voor en achter en werkt via automatische lichtsakeling, mits het elektrische systeem is ingeschakeld.

Functies

- LED Technologie: Voorzien van heldere LED-verlichting aan de voor- en achterzijde.
- **Remlicht:** In het achterlicht is een remlicht geïntegreerd. Dit remlicht wordt geactiveerd door het bedienen van de remhendels.

5.5 Verkeersveiligheid en Gebruik

I. Capaciteit en Onderdelen

- Vervoer: De SitGo is bedoeld voor het vervoer van één persoon.
- Bagagedrager: De bagagedrager is niet bedoeld voor personenvervoer.
- Maximale Belasting: De SitGo heeft een maximale belasting van 120 kg.
- Onderdelen: Gebruik uitsluitend originele SitGo onderdelen.

II. Controle Vóór de Rit

Controleer voor elke rit de volgende punten:

- Remmen & Verlichting: Controleer de correcte werking van de remmen en de verlichting.
- Banden: Zorg dat de banden op de juiste spanning zijn.
 - *Juiste Bandenspanning: 3.0 BAR / 44 PSI*
- **Bevestiging:** Controleer regelmatig of wielen, stuur, zadel en alle schroefverbindingen goed vast zitten.

III. Rijgedrag en Ondergrond

- Ondergrond: Gebruik de SitGo alleen op een solide en vlakke ondergrond. Zacht, glad of ongelijk terrein verhoogt het risico op gevaarlijke situaties.
- Gladheid: Rij voorzichtig op wegen die glad zijn door regen, ijsvorming of sneeuw.
- Afdalingen:
 - Let op dat zich geen gevaarlijke snelheid ontwikkelt bij afdalingen.
 - Rem tijdig en rijd niet sneller dan 20 km/uur.
 - Houd er rekening mee dat de remweg langer kan zijn tijdens een afdaling.

IV. Wettelijke Eisen en Beperkingen

- Verkeersregels: Houd u ten alle tijden aan de geldende verkeersregels.
- Zichtbaarheid: Zorg dat u altijd door andere verkeersdeelnemers wordt opgemerkt.
- Rijvaardigheid: Als u onder invloed bent van verdovende middelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden, mag u niet op de SitGo rijden.
- Gezichtsvermogen: U dient voldoende gezichtsvermogen te hebben om in elke gebruikssituatie veilig te kunnen rijden.
- Minimumleeftijd: Om op de SitGo te mogen rijden, dient u 16 jaar of ouder te zijn.
- Trottoir/Voetgangersgebied: U mag hier alleen rijden als uw snelheid niet hoger is dan 6 km/uur.

V. Reiniging

- Gebruik voor het reinigen **geen hogedruk- of stoomreiniger!**

Gebruik de SitGo niet als u tijdens de controle onregelmatigheden constateert, neem voor meer informatie contact op met uw dealer!

5.6 Onderhoud

Jaarlijkse Inspectie en Garantie

Wij adviseren u de SitGo ten minste jaarlijks te laten inspecteren door een erkende dealer. Dit is noodzakelijk om aanspraak te kunnen blijven maken op de garantie.

Reparaties en Vervanging

- **Storingen en Defecten:** Breng de SitGo in geval van storingen of defecten onmiddellijk naar uw dealer voor reparatie.
- **Veiligheidscomponenten:** Het vervangen van veiligheids-gerelateerde componenten, zoals het frame, de remmen, verlichting, het stuur, de voorvork en de aandrijving, dient altijd door uw dealer te worden uitgevoerd.
- **Zelf vervangen (Aansprakelijkheid):** Indien u ervoor kiest om zelf componenten te vervangen, bent u zelf aansprakelijk voor eventuele schade of letsel als gevolg van niet-goed gemonteerde onderdelen.

5.7 Weersomstandigheden en Vervoer

Waterbestendigheid

De SitGo en zijn onderdelen zijn spatwaterdicht. Dit betekent dat ze bestand zijn tegen normale regenval.

Let op: De SitGo is niet bestand tegen het afspuiten met een hogedruk- of stoomreiniger.

Vervoer Achter op de Auto

Bij het vervoeren van de SitGo achter op een auto zijn twee belangrijke maatregelen vereist:

- **Accu Verwijderen:** Haal altijd de accu uit de bagagedrager voordat u de SitGo vervoert.
- **Display Beschermen (WAARSCHUWING):** Scherm het display af voor regen. De windkracht die tijdens het rijden ontstaat, kan regenwater met hoge druk op het display drukken, wat schade kan veroorzaken. Het afschermen van het display zal de levensduur bevorderen.

6. Rijden met de SitGo

Na het lezen van de productinformatie bent u klaar om te beginnen met rijden.

Stapsgewijs Opstarten

1. Plaatsnemen: Neem plaats op het zadel van de SitGo.
2. Inschakelen: Schakel het elektrische systeem in door éénmaal kort op de aan/uit-knop (de middelste toets) op het display te drukken. (Zorg ervoor dat u de remhendels hierbij niet ingeknepen houdt.)
3. Klaar voor Rit: Het display start op en toont binnen enkele seconden de batterij-inhoud.

Starten en Ondersteuning

- Loopfiets Principe: De SitGo is een loopfiets; de elektrische ondersteuning wordt pas geactiveerd nadat u eenmaal een voorwaartse beweging heeft gemaakt (uzelf heeft afgezet).
- Evenwicht: Let op: u dient zelfstandig evenwicht te kunnen behouden tijdens het rijden op de SitGo.

Tips voor Veilig Gebruik

- Nieuwe Gebruikers: Als het uw eerste keer is, probeer de SitGo dan uit in een rustige omgeving om te wennen aan het rijgedrag.
- Ondersteuningsniveau: Leer het voertuig eerst kennen in ondersteuningsniveau 1 voordat u de hoogste stand gebruikt.
- Accu Actieradius: Rijden in het hoogste ondersteuningsniveau zal de accu sneller leeg laten lopen. Doseer het gebruik om een grotere actieradius te waarborgen.
- Stuurbeheersing: Houd ten alle tijden uw beide handen aan het stuur om de veiligheid voor uzelf en andere weggebruikers te waarborgen.
- Wegrijden: Let tijdens stilstand op het gekozen ondersteuningsniveau om te voorkomen dat u te snel weggrijdt en de controle over de SitGo verliest!

6.1 Uitschakelen en Parkeren

Wanneer u uw bestemming heeft bereikt, volgt u deze stappen:

Uitschakelen

Systeem Uitzetten: Houd de middelste (aan/uit) knop op het display ingedrukt. Het display zal uitschakelen.

Parkeren en Stallen

- Vergrendeling: Zet de SitGo ten alle tijden op slot om diefstal te voorkomen.
- Stalling: Wij adviseren u de SitGo na het rijden op een droge plek te stallen.

7. Display en Bedieningspaneel

Het display is uw centrale interface voor het bedienen van de elektrische ondersteuning en het monitoren van de SitGo.

Weergegeven Informatie

Het display toont tijdens het gebruik de volgende cruciale informatie:


- Accucapaciteit: De actuele laadtoestand van de accu.
- Snelheid: De huidige rijsnelheid.
- Ondersteuningsniveau: Het geselecteerde niveau van elektrische ondersteuning.

Bedieningstoetsen

Toets	Functie
Aan/Uit-knop (Midden)	Kort drukken: Systeem inschakelen . Lang indrukken: Systeem uitschakelen .
+ / - knoppen	Schakelen tussen de ondersteuningsniveaus (van niveau 1 tot maximaal 5).

Belangrijke Opmerkingen

- Automatisch Uit: Het systeem schakelt automatisch uit na 5 minuten inactiviteit.
- Veiligheid: Schakel het display en het systeem altijd uit wanneer u de SitGo verlaat.

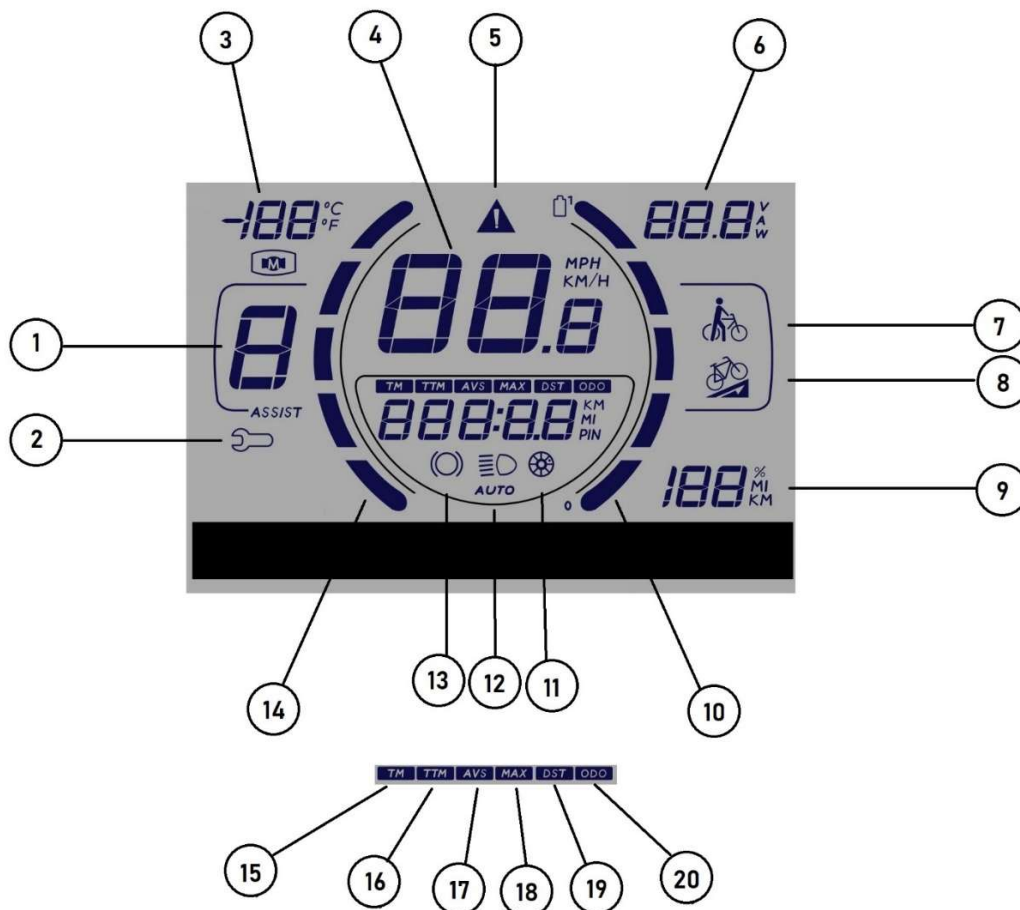

1	Ondersteuningsniveau
2	U bevindt zich in het instellingen menu
3	Buiten tempratuur
4	Snelheidsaanduiding
5	Foutmelding <i>(kijk welk cijfer bij 1 staat voor het type foutmelding)</i>
6	Aanduiding: Volt - Ampere - Wattage
7	Loopfunctie
8	Hill assist <i>(niet van toepassing op de SitGo)</i>
9	Batterij status procentueel
10	Batterij status in blokvorm
11	Trapsensor actief <i>(niet van toepassing op de SitGo)</i>
12	Verlichting aan / uit
13	Remsensor actief
14	Ondersteuningsniveau in blokvorm
15	Trip tijd
16	Totale trip tijd
17	Gemiddelde snelheid
18	Maximale snelheid
19	Afstand
20	Totale afstand

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede

Ondersteuning bedienen maximaal 5 standen: (Maximale snelheid 25 Km/h)

Gebruik de + of de - voor het afstellen van het gewenste ondersteuningsniveau.

Informatie:

Door de midden toets eenmaal in te drukken kunt u verschillende informatie zien als: ODO, TIME, TRIP, Voltage, Wattage, Ampère verbruik.

Dagteller resetten:

Houdt de bovenste en onderste toets tegelijk ingedrukt.

Loopfunctie 6 Km/h:

Houdt de onderste knop ingedrukt.

Verlichting display:

Werkt automatisch op sensor bij schemer/donker zal de verlichting zelf inschakelen

7.1 Foutcodes in het Display

Wanneer er een storing optreedt, verschijnt de bijbehorende foutcode in het display, meestal in het ondersteuningsniveau. Tegelijkertijd zal een driehoek met een uitroepteken beginnen te knipperen ter waarschuwing.

Hieronder vindt u een overzicht van de foutcodes en hun betekenis:

Code	Type Storing	Omschrijving
1	Stroom/Controller	Er is een storing in de stroomtoevoer of de controller.
2	Gashendel	De gashendel geeft een foutief of geen signaal.
3	Motor Fase	Een van de motorfasekabels heeft een storing of onderbreking.
4	Motor Hall	De Hall-sensoren in de motor geven een foutieve meting door.
5	Remsensor	Er is een storing in de remsensor.
7	Accu Voltage	Het gemeten accuvoltage is te hoog of te laag .
8	Communicatie	Er is een storing in de communicatie tussen het display en de controller.

EU 8. CE-Markering en Conformiteit

De SitGo voldoet aan de Europese regelgeving en is daarom voorzien van een **CE-markering**.


De conformiteit is gebaseerd op de volgende Europese richtlijnen en verordeningen:

- **Medische Hulpmiddelen Verordening (MDR):** Verordening (EU) 2017/745.
- **Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC)-richtlijn:** Richtlijn 2014/30/EU.

Plaatsing van de Markering

De CE-markering, samen met het unieke **serienummer** van de SitGo, is aangebracht op het **frame onder de treeplank**.

Let op: Het nummer **23020001** is enkel een **voorbeeld** van een serienummer en dient ter illustratie.

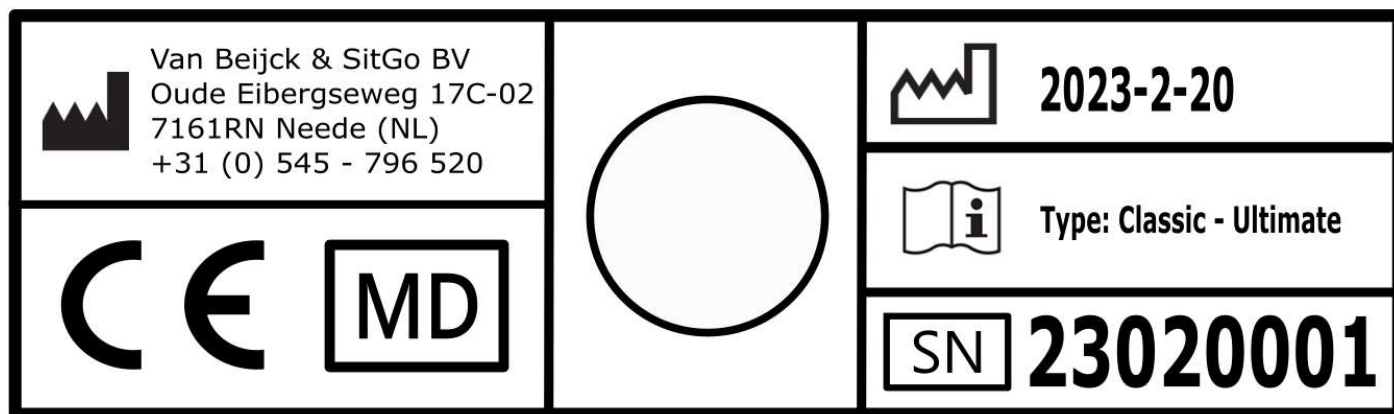



9. Onderhoud

Voor een optimale werking en om de levensduur van uw SitGo te maximaliseren, is regelmatig onderhoud essentieel.

Wij adviseren u dringend het onderstaande onderhoudsschema nauwgezet te volgen gedurende de gehele gebruiksperiode. Door goed voor uw SitGo te zorgen, blijft deze in perfecte staat.

Tip: Zorg dat u het juiste onderhoudsschema in de handleiding plaatst.



Onderhouds- en Serviceregistratie

Dit schema dient als bewijs van het uitgevoerde onderhoud aan uw SitGo. Laat dit formulier invullen en afstempelen door uw erkende SitGo Dealer.

Service/Inspectie	Kilometerstand/Termijn	Datum	SitGo Dealer (Naam & Stempel)	Bijzonderheden/Opmmerkingen	Handtekening
Afleverinspectie	Na 250 km of 2 maanden				
Servicebeurt (Jaar 1)	Jaarlijks				
Servicebeurt (Jaar 2)	Jaarlijks				
Servicebeurt (Jaar 3)	Jaarlijks				
Servicebeurt (Jaar 4)	Jaarlijks				
Servicebeurt (Jaar 5)	Jaarlijks				
Controle Accu					
Aanvullende Service					
Aanvullende Service					

Voor een overzicht met onze erkende dealers verwijzen wij u naar onze website (sitgo.nl/dealernetwerk).



10. De SitGo Verzekeren en Wettelijke Status

Wettelijke Classificatie

De SitGo is voorzien van de **Medical Device Regulations (MDR) 2017/745 certificering** en valt daarmee onder de categorie **Scootmobiel/Invalidervoertuig**.

Deze classificatie heeft de volgende consequenties met betrekking tot kenteken en verzekering:

Vereiste	Antwoord	Toelichting
Blauw Kentekenplaat	Nee	De SitGo is geen snorfiets en kent derhalve geen kentekenplicht.
Gele Verzekeringssticker	Ja	Alle SitGo's moeten verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) hebben en voorzien zijn van de bijbehorende gele verzekeringssticker .

11.0 De Van Beijck Accu (Compact en Efficiënt)

1. In- en Uitschakelen van de Accu


Actie	Procedure	Status
Aanzetten	Houd de aan/uit-knop 1 seconde ingedrukt.	De indicatorlampjes knipperen éénmaal. De accu is nu AAN .
Uitzetten	Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt.	De indicatorlampjes knipperen éénmaal. De accu is nu UIT .

Let op: Wanneer de accu langere tijd niet wordt gebruikt, schakelt deze **automatisch na 3 maanden** uit om de levensduur te behouden.

2. In- en Uitschuiven van de Accu

Het correct plaatsen en verwijderen van de accu vereist aandacht:

- **Plaatsing:** Zorg dat de accu altijd goed in de slede zit voordat u deze inschuift.
- **Aanvang:** Het in- en uitschuiven kan in het begin wat **stroef** gaan.
- **Vergrendeling:** Schuif de accu volledig in de slede. Zodra de accu correct op zijn plaats zit, zal het slot aan de linkerkzijde automatisch sluiten en hoort u een "**klik**". De accu is nu correct **vergrendeld**.

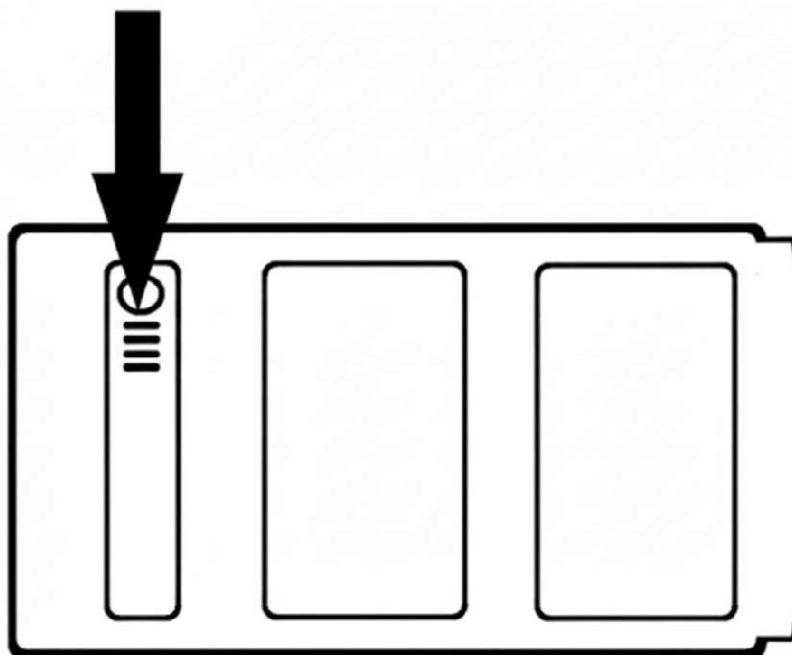

EU Conformiteitsverklaring

1. Geregistreerde handelsnaam fabrikant:

Van Beijck & SitGo BV

- Handelsmerk: SitGo
- Productnaam: SitGo (Model: Classic / Ultimate)

2. Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

3. Basic UDI (als bedoeld in deel C, bijlage IV, MDR)

Basic UDI-DI: 871932673742302SIWX

4. Product- en handelsnaam, productcode etc.

- Productnaam: SitGo (Model: Classic / Ultimate)
- Handelsmerk: SitGo
- Herkenning: Framenummer, *begonnen bij* 2302000
- EAN: Classic = 8719326737409
Ultimate = 8719326737416

5. Risicoklasse van het hulpmiddel overeenkomstig de regels van bijlage VIII.

De SitGo is (overeenkomstig de regels van bijlage VIII) een klasse 1 medisch hulpmiddel.

6. Wetgeving

De SitGo is in overeenstemming met de Europese verordening (EU) 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen. Ook voldoet de SitGo aan de Electromagnetic compatibility Directive (EMC), 2014/30/E



3.1 Fabrikant

Fabrikant : Van Beijck & SitGo BV
Adres : Oude Eibergseweg 17C-2
Postcode + plaats : 7161RN Neede
Telefoonnummer : +31 (0) 545 796 520
Emailadres : info@sitgo.nl
Website : www.sitgo.nl

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede



“ Uw Mobiliteit is onze Kwaliteit! ”

Uw Dealer:

VAN BEIJCK & SITGO BV
Oude Eibergseweg 17C2
7161RN Neede